


Sicherheits-Punktionsbesteck für Pleurapunktionen

Punktion und Drainage von Ergüssen und Luftansammlungen

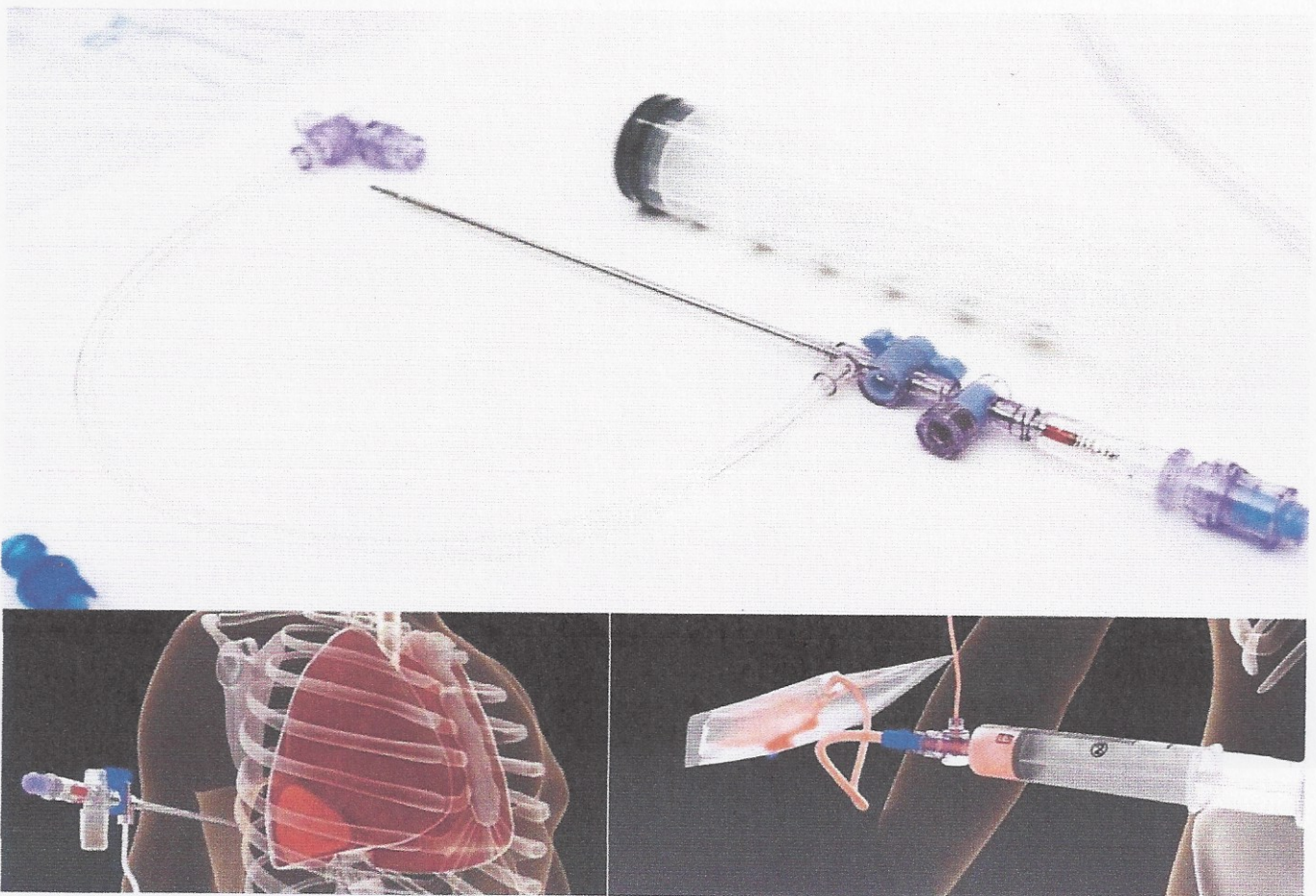


- ✓ Höchste Sicherheit für Patienten, Ärzte und Pflegekräfte
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Hohe Funktionalität
- ✓ Kosteneffizient und zeitsparend



Funktionen , Vorteile und Nutzen

- Pleura-safe® ist eine durchdachte medizintechnische Innovation, mit dem obersten Ziel, die Sicherheit bei Pleurapunktionen für Patienten, Ärzte und Pflegekräfte zu erhöhen. Bei der Entwicklung von Pleura-safe® wurden bewährte Elemente vereinfacht und verbessert sowie neue Techniken integriert.
- Die Aspiration von Ergüssen und Luftansammlungen kann direkt über die Sicherheitspunktionsnadel (Veres-Nadel) oder über den Katheter durchgeführt werden. Die Drainage in den Sekretbeutel erfolgt aktiv mittels Spritze durch Aspiration über den Katheter und das Drei-Weg-Sicherheitsventil. Dabei ist kein manuelles Umschalten notwendig und das Handling ist in angenehmen Abstand zum Patienten möglich.
- Bei größeren bzw. rezidivierenden Ergüssen kann der Katheter als „Mini-Drain“ belassen werden - nochmaliges Punktieren ist nicht mehr notwendig.
- Das System ist immer dicht. Patentierte Ventile machen ein manuelles Umschalten (sowohl über Nadel als auch Katheter) überflüssig. Damit wird die Aspiration von Flüssigkeit und Luft erleichtert und gleichzeitig das Eindringen von Luft in die Pleurahöhle verhindert.
- Verwechslungssichere Anschlüsse verhindern Unsicherheiten und Fehlanwendungen beim Anschließen von Spritze und Sekretbeutel.
- Der Katheter ist röntgendicht. Somit kann seine Position leicht bestimmt und die Therapie effizienter durchgeführt werden. Das spezielle Design des Katheters reduziert die Wahrscheinlichkeit des Festsaugens während der Aspiration.
- Pleura-safe® ist sofort verwendbar und die Anwendung kann von nur einer Person durchgeführt werden.
- Alle diese Vorteile führen zu einer reduzierten Belastung für Patienten, einer erhöhten Sicherheit für Anwender und senken somit den Zeit- und Kostenaufwand.

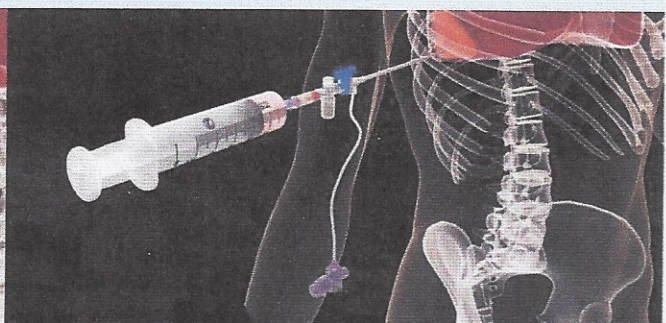

Technische Informationen/Features

- Sicherheitspunktionsnadel (Veres-Nadel)
- Katheter-über-Nadel Prinzip
- Patentierte Sicherheitsventile
- Steril verpackt
- Latex- und PVC- frei
- Röntgendicht

Literatur

- *Pneumothorax following Thoracentesis; A systematic review and Meta-Analysis; Gordon CE et al; Arch Intern Med. 2010;170(4):332-339*
- *Indwelling small pleural catheter needle thoracentesis in the management of large pleural effusions; Grodzin CJ et al; Chest. 1997 Apr;111(4):981-8*

Bestellinformationen

Pleura-safe® Set enthält:

- 1 Stk. Katheter (8 Ch/F; 2,7 mm) mit integrierter Sicherheitspunktionsnadel (14G, 170 mm) und automatischem Drei-Wege-Sicherheitsventil
- 1 Stk. 60 ml Luer-Lock Spritze
- 1 Stk. 2000 ml Sekretbeutel mit Luer-Lock-Verschluss und Auslass

Bestellnr.	Pleura-safe® Sets pro VE
100166	10 Stk.
100165	20 Stk.

Individuelle Sets auf Anfrage

Kontakt/Bestellung

Ihr Fachhändler:


mefina medical
 Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Telefon: 0 21 04 - 8 33 80 - 0
www.mefina-medical.de

Hersteller & Inverkehrbringer gemäß MPG
 allomed Medizintechnik GmbH, Österreich,
 ISO 13485:2003 |  0051 | www.pleurasafe.com